



ユニキャリ ユニキャリロング

取扱説明書

(おんぶパーツについては別紙説明書をご覧ください)

この説明書は、ユニキャリを適切にお使いいただくための大切な項目が記載されています。
お使いになる前によくお読みいただき、またいつでも見られるように大切に保管してください。

製品概要

ユニキャリは、日常生活での「抱っこ」をサポートする為に開発しました。
手軽にお使いいただけるよう、できるだけ簡素な動作で装着できることを目標にしました。特別な場合に使用するのではなく、日常生活のさまざまな場面でご使用いただき、今までの生活がより快適に、そしてこれからの生活の範囲がさらに広がることを願っております。

ユニキャリは、お使い頂くことでより楽に「抱っこ」ができる製品です。体重30kg程度の方を想定しましたが、製品の耐久性は十分ありますので、体力のある方なら30kg以上の方にもご使用して頂けます。ただし、無理なご使用は腰を痛める危険があります。身体の能力に合わせて、無理に抱っこをすることがないようにご注意ください。

股関節を曲げることが出来ない方(特に股関節脱臼の恐れがある方)、その他の懸念がある場合は、必ず専門のセラピストに相談して使用してください。


取扱いについて

必ず守ってください

- ご使用前に、本体やバックルなどに傷や変形が無いか確認してください。傷や変形・縫製部分にホツレ等の生じた製品は使用しないでください。
- ユニキャリは使用時に強い力がかかります。破損の原因になるので製品の改造等は絶対にしないでください。
- 本体長さ・ネット長さ調整ベルトは無理に引っ張らないでください。長さ調整をする場合、ベルトにかかる荷重を軽くして行ってください。
- 本体やバックルの劣化・変形を防ぐ為、熱湯で消毒したり高温になる車内に放置しないでください。また、サウナ等の高温環境での使用はしないでください。
- 車椅子やカーシートなどへの移乗時に、お子様に装着したまま外す場合は、落下の危険がありますので特にご注意ください。
- バックルなど樹脂部品は踏んだり、衝撃を与えたりしないでください。

各部名称


下図の面を外面・反対側を内面と表記します

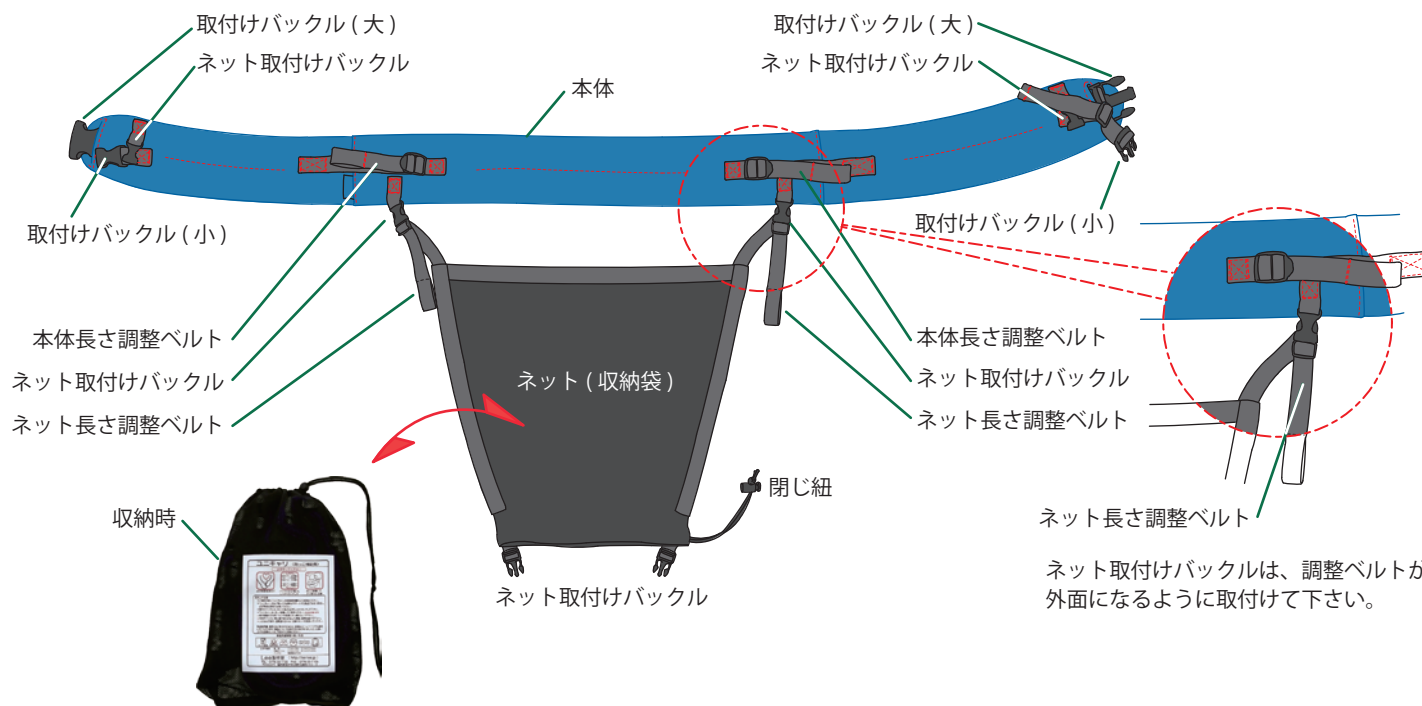

清潔にお使い頂くために

ユニキャリは洗濯をすることができます。
洗濯をする場合は、バックル類の損傷を防ぐ為、また他の洗濯物を傷めることが無い様に必ず洗濯ネットに入れるか収納袋に収めて行ってください。

家庭洗濯等取り扱い方法

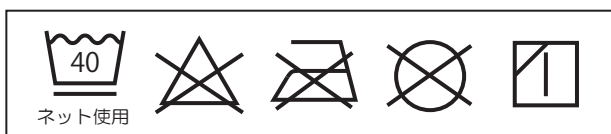


入浴・プールなどで使用した後は、ニオイやカビの発生を防ぐ為、必ず陰干しをして乾燥させてください。


主材の組成	表地	ナイロン78%	ポリエステル22%
	内部メッシュ	ナイロン75%	ポリエステル25%
	バックル	樹脂製品(POM)	

使い方いろいろ 広がる世界


ユニキャリが、生活のお役に立つことを心より願っております。

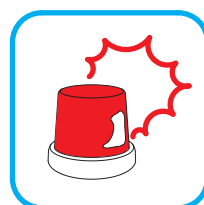

緊急避難

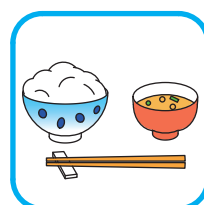

食事

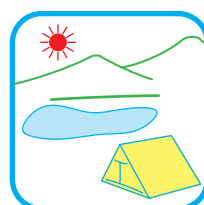

レジャー



入浴



おんぶ(*)

(*)「おんぶ」はオプションのおんぶパーツが必要です。

あなたのもう一本の手として、さまざまな場面でご使用ください。



抱っこに



歩行介助に



食事介助に



ちょっとした移動で



ユニキャリは、2013年
キッズデザイン賞を受賞
しました

製造元

製品にお気付きの点や不明な点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店、又は下記までご連絡ください。

株式会社 Lee 製作室
(<http://lee-lee.jp>)

〒910-0374 福井県坂井市丸岡町北横地 40-9
TEL: 0776-50-1105 FAX: 0776-50-1106
MAIL: lee-s@k3.dion.ne.jp