


# クール抱クッション 取扱説明書

クール抱クッションをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この説明書は、クール抱クッションを適切にお使いいただくための大切な項目が記載されています。お使いになる前によくお読みいただき、またいつでも見れるように大切に保管してください。

抱クッション・クール抱クッションは、共に車椅子・カーシートなどの姿勢保持具として開発した製品です。クール抱クッションは、今までの抱クッション以上にさまざまな場面でお使いいただけると思います。しかしながら、上記以外の使用をされる場合は、安全に十分配慮してお使い下さい。

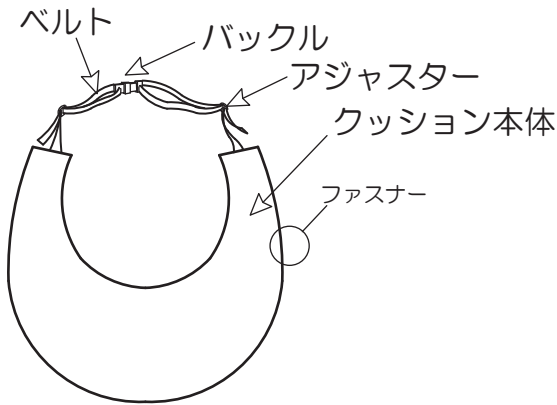

## カバー

※乾燥機を使用しないでください。

カバーは、綿・麻混合生地のため、洗濯により縮みが生じます。使用に関して支障が無いように縮み分を見越して製作しております。陰干しにて自然乾燥し、乾燥機を使用しないでください。ベルトやバックルが他の洗濯物と絡まないように、必ず洗濯ネットに入れて洗濯・脱水をしてください。

## 3Dメッシュ・通気ビーズ



アイロン掛けは出来ない

※洗濯前にファスナーが閉まっている事を確認して下さい。

洗濯機でクッションの中身を洗濯・脱水するときは、通気ビーズがこぼれだして洗濯機に詰まったり、故障の原因となる場合があります。必ず洗濯ネットに入れて洗濯・脱水をしてください。

ベルト (25mm幅)  
着脱用バックル (樹脂製品)  
長さ調整アジャスター (樹脂製品)

クッション本体  
カバー (綿・麻混合生地)  
3Dメッシュ (ナイロン・ポリエステル混合)  
通気ビーズ (熱可塑性エラストマー)

## カバー・クッション本体 共通洗濯表示



液温40℃限度、洗濯機の弱水流  
又は弱い手洗いが良い



手絞りの場合は弱く、遠心脱水の  
場合は短時間で絞る




ドライクリーニングは出来ない



塩素系漂白剤による漂白が出来ない

## 基本的な取付け方法

両手の位置が決まることで姿勢がくずれにくく、楽に着座姿勢を続けることが出来ます。

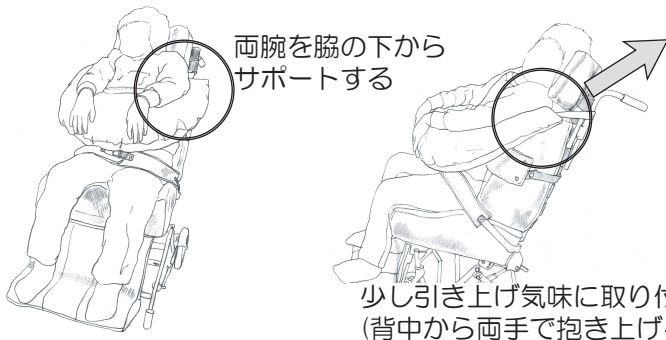

抱クッションは、子供を後ろから抱えあげるイメージで考案されたクッションです。

効果的に使用していただく為に、利用者の肩より高い部分に付属のバックルを取り付けてください。(付属のバックルを使用せずに本体のみでご利用いただく事も出来ます。)


また、着用位置については、それぞれの利用者の身体状況等によって変化するので、個々の利用者にもっとも適切な位置に調整してください。

## 付属の黒バックル取付け方法

車椅子ハンドルに

バギー取手に

自動車の座席ヘッドレストに

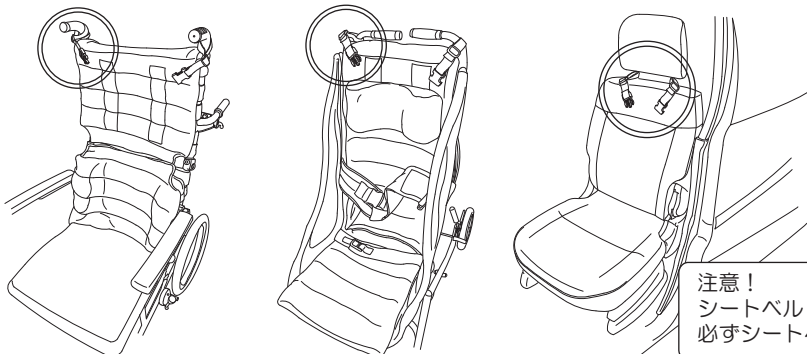

付属の黒バックルの使用について

黒バックルは「必ず使用しなければならない」ものではありません!! 調整しろの問題や、使用方法によっては、黒バックルを使わず、本体バックルを使って直接使用した方が使いやすい場合もあります。利用状況によって、最適な方法でお使いください。

※注) イラストはカーシートですが、車椅子やバギーでも黒バックルを使わず、抱クッション単独で使う場合もあります。

注意!  
シートベルトの代わりにはなりません  
必ずシートベルトを着用してください

Lee 製作室 (http://lee-lee.jp)

福井県坂井市丸岡町北横地 40-9  
TEL : 0776-50-1105 FAX : 0776-50-1106  
MAIL : lee-s@k3.dion.ne.jp