
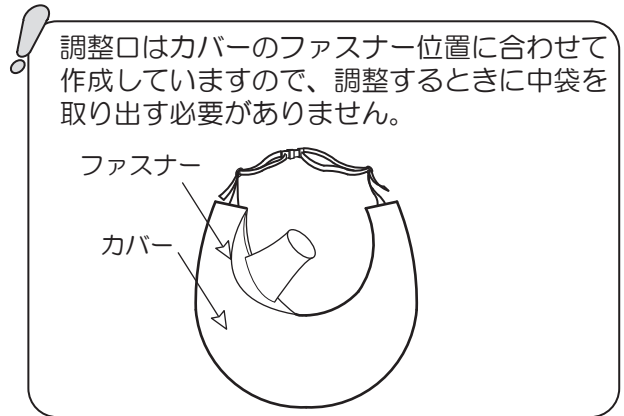


抱クッション 取扱説明書

抱クッションをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この説明書は、抱クッションを適切にお使いいただくための大切な項目が記載されています。
お使いになる前によくお読みいただき、またいつでも見れるように大切に保管してください。

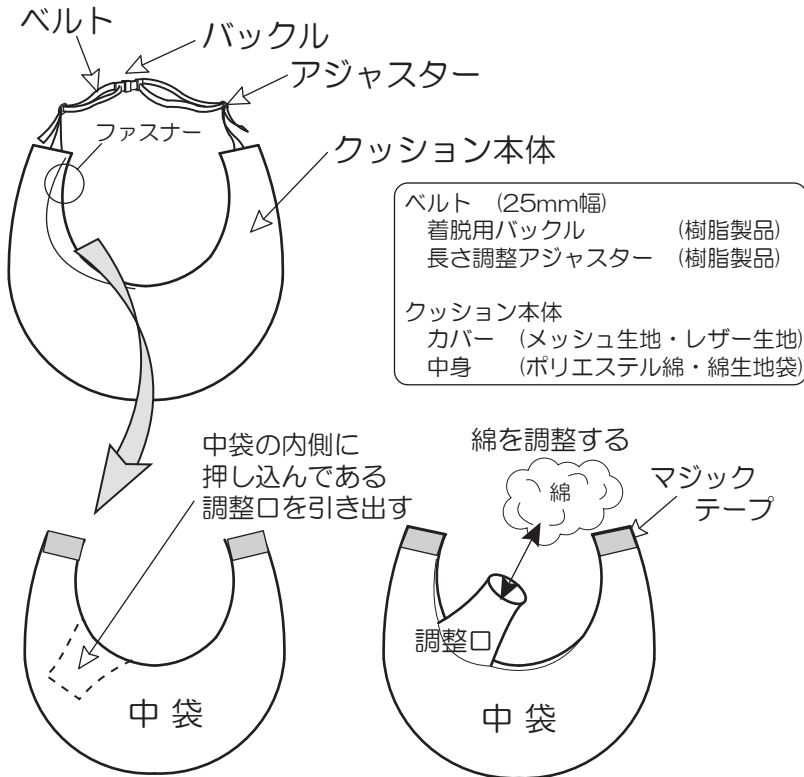

ファスナーを開くと中身が取り出せます。
中身のズレや片寄りを防ぐために、中身を取り付けるときは、両端にあるマジックテープをカバーの内側にあるマジックテープに確実に固定してください。


本体カバーを取り外すことで、メッシュ生地は丸洗いが出来ます。レザー生地は陰干しが出来ますので、衛生的に使用していただけます。

基本的な取付け方法

両手の位置が決まることで姿勢がくずれにくく、楽に着座姿勢を続けることが出来ます。



両腕を脇の下からサポートする

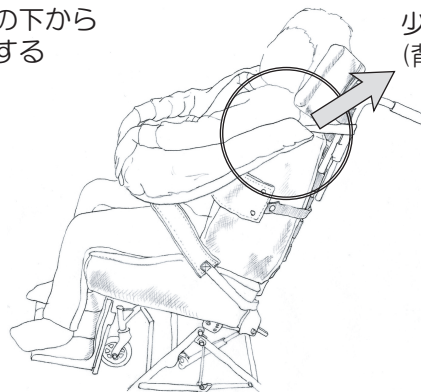



少し引き上げ気味に取り付ける (背中から両手で抱き上げる感じ)

抱クッションは、子供を後ろから抱えあげるイメージで考案されたクッションです。

効果的に使用していただく為に、利用者の肩より高い部分に付属のバックルを取り付けてください。(付属のバックルを使用せず本体のみでご利用いただく事も出来ます。)

また、着用位置については、それぞれの利用者の身体状況等によって変化するので、個々の利用者にもっとも適切な位置に調整してください。

黒バックル取付け方法

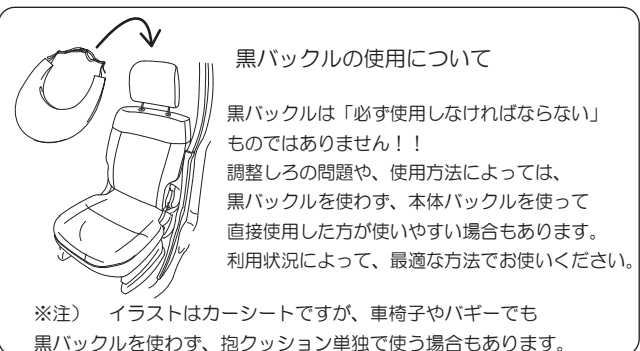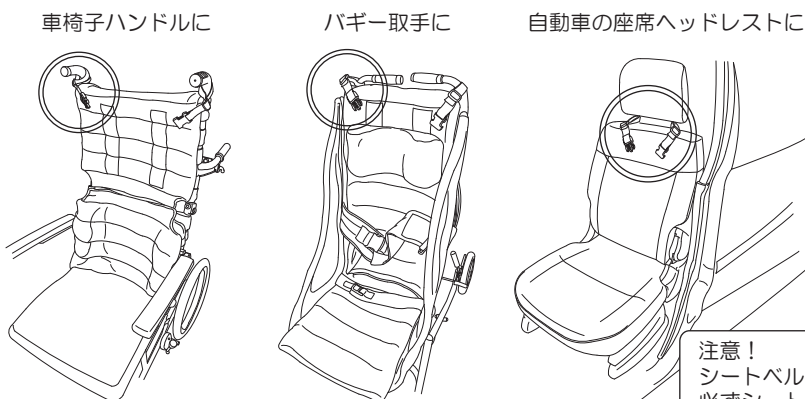

注意！
シートベルトの代わりにはなりません
必ずシートベルトを着用してください

Lee製作室 (http://lee-lee.jp)

福井県坂井市丸岡町北横地 4-0-9
TEL: 0776-50-1105 FAX: 0776-50-1106
MAIL: lee-s@k3.dion.ne.jp