


補助ベルト

「補助ベルト」はこんな時にご使用ください

○腰を持ち上げてしまう

○身体をよく動かすので姿勢が崩れてしまう

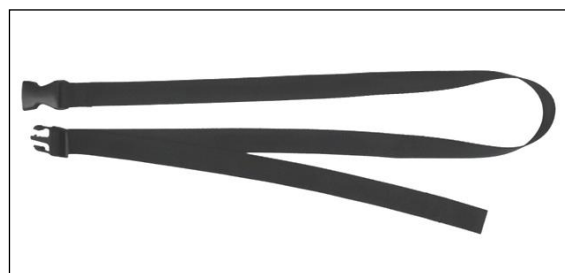

長さ：約 140cm（最長周囲）

＜補助ベルトの取り付け方＞

- ① クロスYベルトを先に椅子にセットします。
- ② 補助ベルトを、椅子の“座面と背もたれの境目”の位置に巻き、バックルを留め、補助ベルトの先端を引っ張って弛みがなくなるまで締めてください。



ベルトの先端を引っ張ると長さを調整できます。それぞれ取り付け後に引っ張って締めてください。

Lee 製作室 <http://lee-lee.jp/>

TEL : 0776-50-1105

FAX : 0776-50-1106

MAIL : lee-s@k3.dion.ne.jp