


使用方法

1 座位保持バッグを椅子等にセットします。

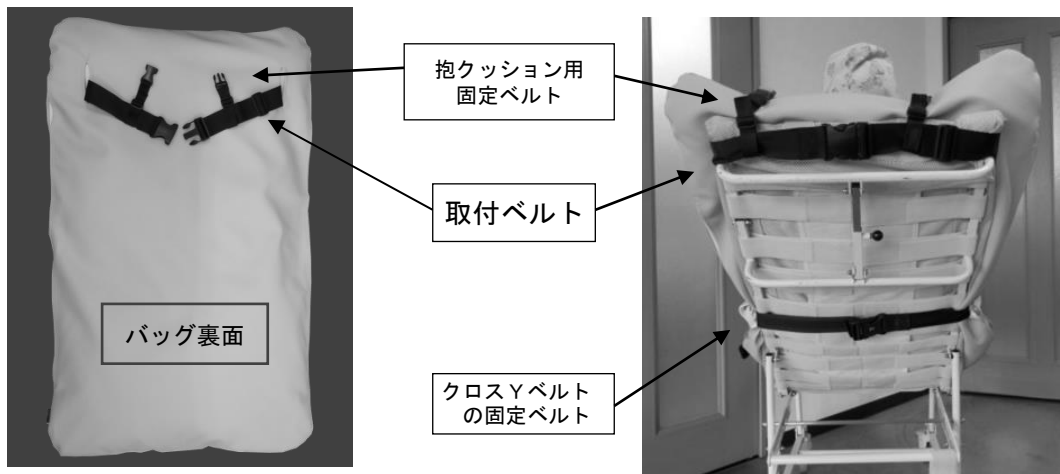

座位保持バッグ裏面に固定用の取付ベルトがあります。

取付ベルトを椅子等にまわしバックルで留めるだけで、座位保持バッグが簡単に固定されます。

(右写真のように、別売のクロスYベルトを併用することでより安定します。)

2 体幹を包み込むように、中袋を引き出します。



左右のファスナーを開け、中袋を外に引き出すようにすると、体型に合った形状にすることができます。
包み込むようにサポートします。

3 自動車等でご使用の際は、クロスYベルトや抱クッションの併用をお勧め致します。



※クロスYベルト、抱クッション、および土台になる椅子等は「座位保持バッグ」に含まれていません。

座位保持バッグは「クロスYベルト」や「抱クッション」を取付できる仕様になっています。

クロスYベルトや抱クッションを装着することで、安定した座位を保つことができます。