

ユニキャリ用おんぶパーツのセット方法

① ユニキャリの ネット（収納袋）は使わないのではすしておく。

② ユニキャリとおんぶパーツは、バックルやベルトが付いている面を上にして置く。

③ 成長対応部にユニキャリを通す。（下図参照）

※成長対応部は3段階に長さ調整できますのでお好みの部分に通してください。


④ フロントベルトを左右どちらかに通す。（下図参照）

※利き手の反対側に付けると調整が楽です。（下図の場合は右利きの方におすすめ）



成長対応部の目安

お子様の身長が
130cm 以上→上の部分
110-130cm→中央部分
110cm 未満→下の部分

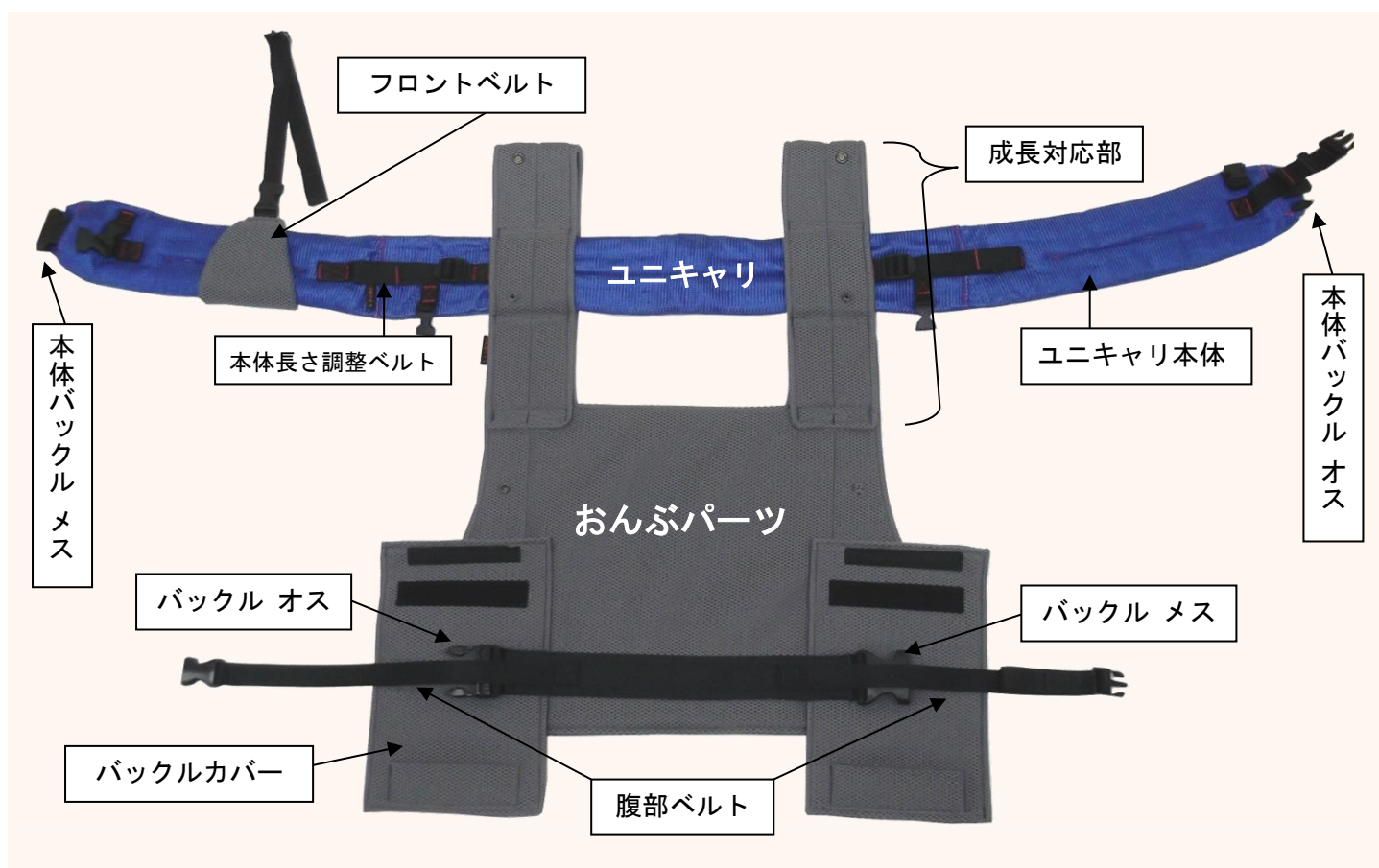

⑤ 成長対応部にユニキャリを通した位置が

下から 1 番目・2 番目の場合、上部を折りたたんでボタンで留めることができます。



⑥ ユニキャリとおんぶパーツを下図のようにバックルでとめる。



大きいバックルの上に
小さい補助バックルが付いている
おんぶパーツをお持ちの方は、
バックルを大・小ともはめてください。

⑦ バックルをバックルカバーで巻き込みとめる。



左右の「本体長さ調整ベルト」を引っ張ると
ユニキャリ本体の長さを短くできます。

⑧ ひっくり返します。

これでセット完了です。

この面にお子様を乗せます。

おんぶ方法は裏面をご覧ください。




装着方法

(介助者の方以外にもう一人サポートをしていただく方が必要です。)

HPの動画もご参照ください

<http://lee-lee.jp>

商品紹介→ユニキャリ

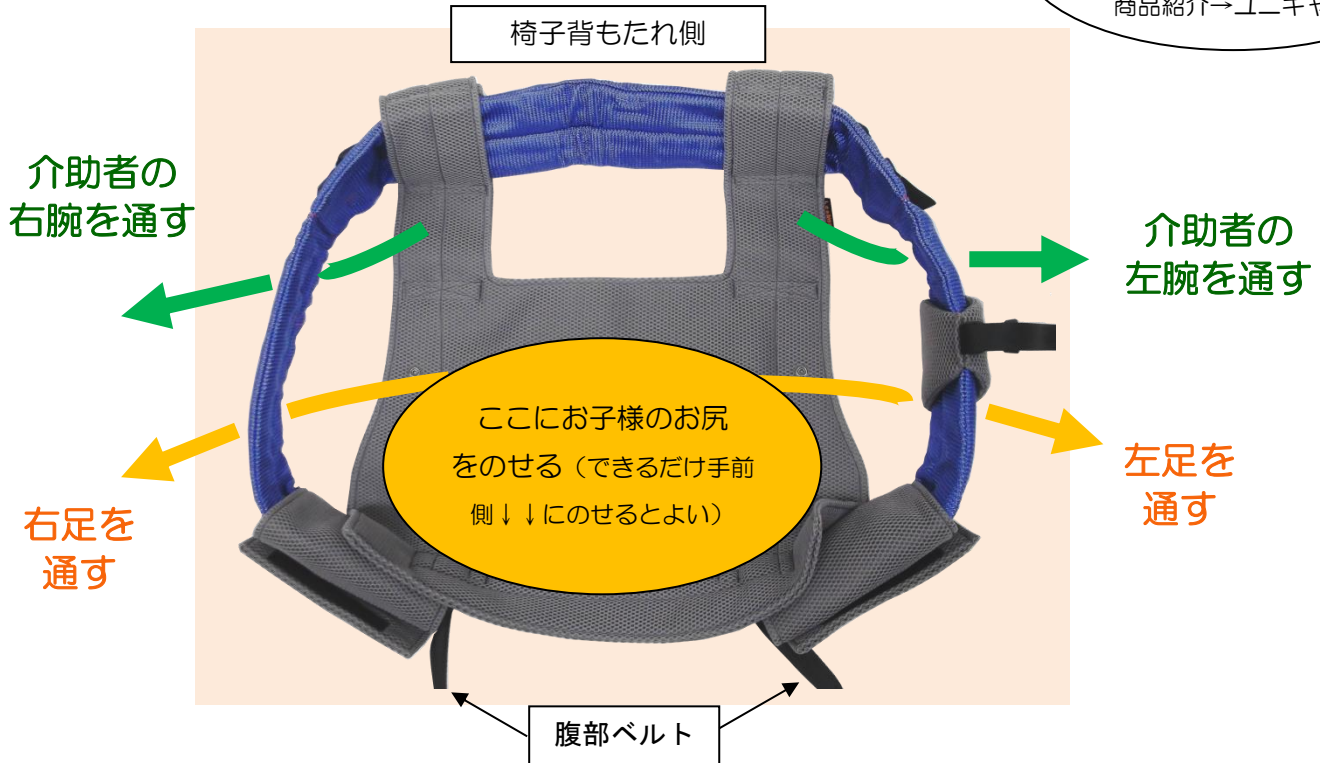

- ⑨ 背もたれのある椅子などに
おんぶパーツをセットしたユニキャリを置く。



- ⑩ お子様をおんぶパーツ上に座らせ、輪になった部分に足を通す。(上図オレンジ矢印)

※この時、お子様のサポートをする方が必要です。お子様が安定して座っていればサポートは必要ありません。



お子様を座らせ足を通します



両足を入れた状態



おんぶパーツの手前部分が
お子様の股の間から少し
見えるくらいまで、おんぶ
パーツを引き上げます

- ⑪ リュックを背負う要領で、介助者の方の両腕を通す。(左図緑矢印)



お子様の腕はユニキャリの上に出してください。

- ⑫ 立ちあがる前に、フロントベルトの紐を反対側の本体に通してバックル留めします。
紐の先端を引っ張ると締め具合の調整ができます。きつめに締めるほうが楽に感じます。



紐をユニキャリに通してまわします



バックルをはめます



紐の先端を引っ張ると締まります

- ⑬ 腹部ベルトを留めて装着完了です。



紐の先端を引っ張ると締まります

捻じれや巻き込みがないかなどご確認ください。



装着完了！



お子様の脇の下にユニキャリが通っている状態がベスト