

クロスYベルト

骨盤保持用具

姿勢保持の新しい形のご提案です

腰部サポート機能と前ずれ防止機能で、

骨盤を安定させて 姿勢の崩れを防ぎます




～ 特 徴 ～

- しっかりサポート …… 骨盤が後傾しないように、しっかりサポートします
- 3D メッシュの3層構造 …… 軽量な上に丈夫
- 蒸れ・熱がこもりにくく快適です
- パーツの分離が簡単 …… 手軽に洗えるので清潔に使えます
- かさばらず、携帯が楽 …… 車椅子、飛行機や自動車のシートやレストランの椅子など様々な場面で使えます

(背もたれの形状等により、適さない場合もあります)


- 前ずれ防止だけでなく、背筋の伸びた良い姿勢を楽に保つことができます。
- 軽量で持ち運びが楽にできます。
車椅子に装着してあれば、レンタカー・電車・飛行機などに付け替えるだけで簡単に使用でき、お出かけにとっても便利です。

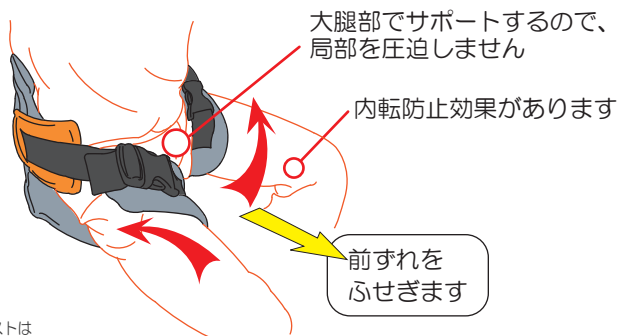

上下のイラストは
固定ベルトを省略しています



腰部ベルト(芯材入り)が骨盤をしっかり
とサポートするので、背筋が伸びた良い姿勢を
保つことができます
(芯材は簡単に取外しできます)

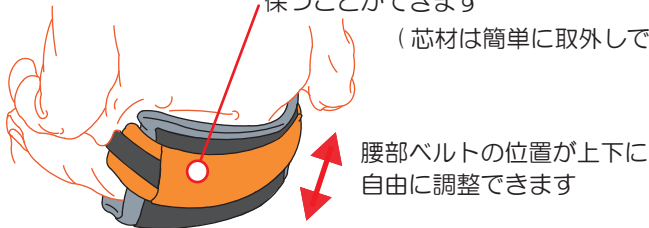

サイズ対応表


数字は(cm)

	S	M	L	LL
シート幅	23	30	35	38
身長目安	80 未満	70～130	120 以上	160 以上





体格や使用状況等により異なる場合があります
※手作り品のため数値に多少の誤差が生じます

5色の中から選べます

※シート部の色はグレーのみです

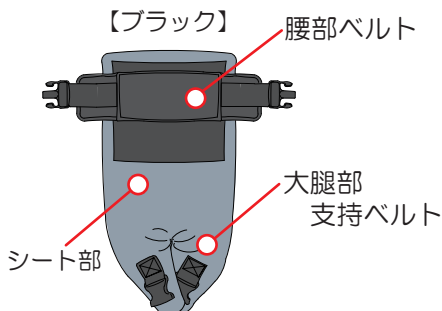

イラストは固定ベルトを省略しています

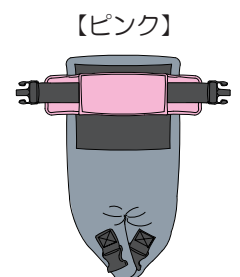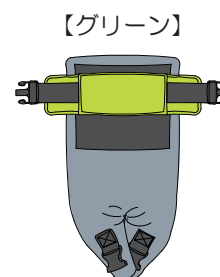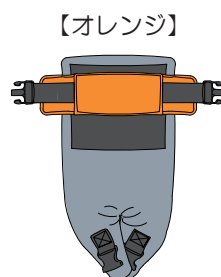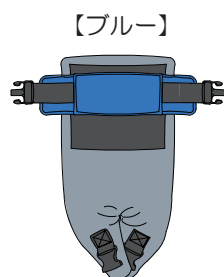

イメージ図ですので、実際の色・質感とは異なります。



固定ベルトが2タイプ

用途に合わせてお選びください

横ベルト



車いす
レストラン等の椅子
カーシート
飛行機のシート

その他様々な場面での
使用が可能です

固定ベルト長さ：
約 160cm(最大周囲)

横ベルトでの使用例



縦ベルト




バケットシート
ベンチシート
採型モールド用クッション
などで

多動傾向の方にも
(シートが固定され安定します)

固定ベルト長さ：
約 160cm(最大周囲)

縦ベルトでの使用例

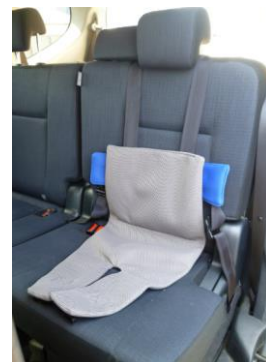

* 縦ベルトは座面と背もたれの間に隙間がない座席には付けられません

オプション

補助ベルト

前ずれ防止に。
腰を持ち上げてしまう方に。
シート部が浮き上がるのを防ぎます。



長さ：約 160cm
(最大周囲)

付属品 <固定ベルト横タイプ用>

すり落ち防止ベルト

固定ベルトやシート部が
下がってきてしまう場合に。

長さ：約 80cm



クロス Y ベルト BODY プラス

体幹までしっかり
支えたい方はこちら



体幹から骨盤までを
一体的に保持します

BODY プラスカタログを
ご覧ください

※ 背もたれや座面の種類・形状によっては取付できない・適さない場合があります(本体・オプション共)
※ 椅子類は商品に含まれません ※ 改良により予告なく仕様等が変更になる場合があります
※ 固定ベルト、補助ベルト、すり落ち防止ベルトは追加料金で延長可能です