

抱クッション



メッシュカバー製品

メッシュ生地拡大

背中から両手でやさしく支えるようにサポートします。

！重度障害の方も拘束せずに楽に姿勢を保持できます。

サイズは SS・S・M・L・LL の5種類から選べます
オーダーメイドもお受けします。(詳細は裏面をご覧ください)

抱クッションの特徴

- 支えあげるように使用することで、体幹のくずれを やさしく 防止します
- 中綿の量や詰め加減を、手軽に調整できます
- 車椅子をリクライニングさせても 両手が落ちにくい 形状です
- 車での移動時に長時間『楽な』姿勢を保てます (シートベルトは必ず着用してください)



レザーカバー製品

- 豊富なカラーバリエーション
(レザー17色・メッシュ17色から 選択できます)
- カバーが洗えて清潔！(メッシュのみ)
- 持ち運び『楽々』！
- 取り付け簡単！



ポケットカバー (オプション)

腕の支持や防寒にご利用ください。
筒状の形で脱着は、中に通すだけ！
現在使われている 抱クッションにも
ご利用いただけます。

※生地・色も本体と同じくお好み
のものを選択していただけます。


ポケットカバーは別売オプション品です。



中綿の調整口


利用される方に合わせて、中綿の
量や詰め加減の調整が簡単に出来る
調整口が付いています。

抱クッション使用イメージ

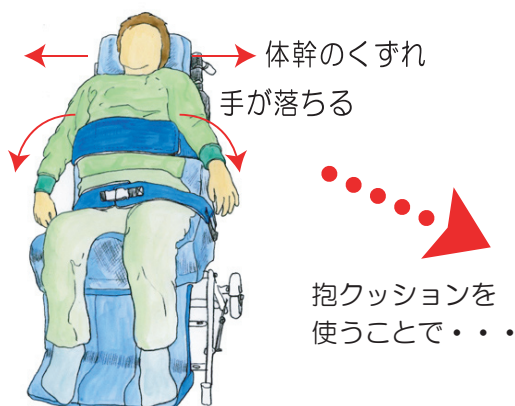

車椅子で長時間移動していると
どうしてもこのような姿勢に
なりがちです。

腕は、思っている以上に「重たい」ものです。
このような姿勢をとると、身体的に苦しいだけでなく、
呼吸も浅くなりがちです。

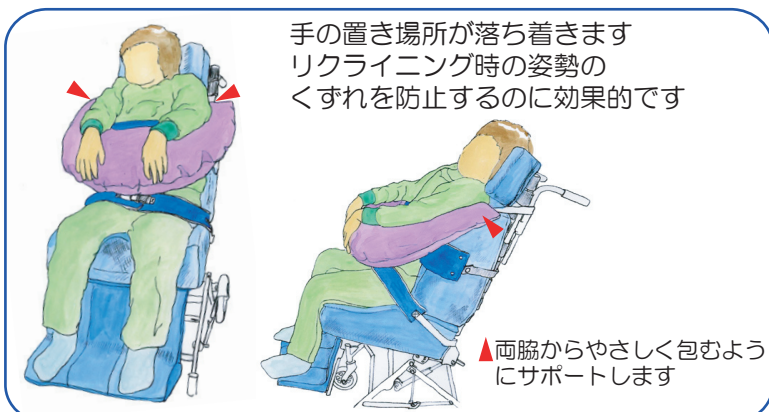


手の置き場所が落ち着きます
リクライニング時の姿勢の
くずれを防止するのに効果的です

▲両脇からやさしく包むよう
にサポートします

だ 抱クッション

ベルト (25mm幅)
着脱用バックル (樹脂製品)
長さ調整アジャスター (樹脂製品)

クッション本体
カバー (メッシュ生地・レザー生地)
中身 (ポリエステル綿・綿生地袋)

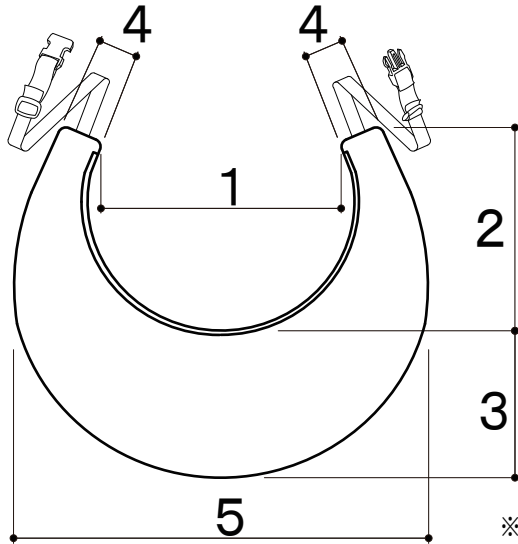

本体カバーを取り外すことで、メッシュ生地は丸洗いが出来ます。レザー生地は陰干しが出来ますので、衛生的に使用していただけます。

数字は(cm)

型 サイズ	SS	S	M	L	LL
1	18	24	30	35	38
2	16	19	20	25	27
3	16	18	22	23	26
4	7	8	9	9	10
5	34	39	47	50	57

※ オーダーメイドの場合、1～5の寸法を指示して下さい

※生地種類や綿の詰め具合で数値が変わります。また、手作りのため寸法は精密ではありません
改善のため寸法や仕様等を予告なく変更する場合があります

	身長目安
S	～100cm
M	90～130cm
L	120～150cm
LL	150cm～

対応サイズは、あくまで目安です。
体格や車椅子の種類・使用状況、
綿の詰め具合などで異なります。

蒸れや熱こもりが心配な方は、通気性に優れた「クール抱クッション」がおすすめ

カバーが麻生地(メッシュも可) & 中身が3Dメッシュと通気ビーズで
通気性バツグン、丸洗いもできて可能で清潔に保てます。

比較表


	抱クッション	クール抱クッション
中 袋	シーチング	3Dメッシュ
中 身	ポリエステル綿	通気ビーズ
洗 濯	メッシュカバーのみ可	可 能
厚み調整	可 能	両端は不可
熱こもり	有	こもりにくい
蒸 れ	有	蒸れにくい

※抱クッションと
クール抱クッションは
構造が異なりますので、
カバー等の共用はできません

付属バックル取付け方法

(付属バックルは、抱クッション1個に1セット付いています)



車椅子ハンドルに

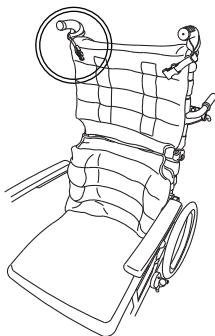

バギー取手に



自動車の座席ヘッドレストに

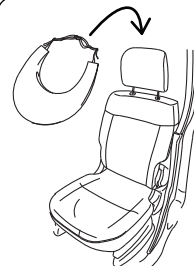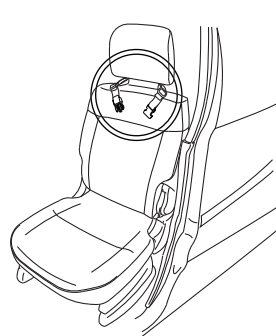

付属バックルの使用について

付属バックルは、必ず使用しなければならないものではありません。
調整しろの問題や、使用方法によっては、
付属バックルを使わず、本体バックルを使って
直接使用した方が使いやすい場合もあります。
利用状況によって、最適な方法でお使いください。

※ イラストはカーシートですが、車椅子やバギーでも
付属バックルを使わず、抱クッション単独で使う場合もあります。

注意！
シートベルトの代わりにはなりません
必ずシートベルトを着用してください

『バリアフリーを ものづくりから』

リー
Lee製作室
<http://lee-lee.jp/>

〒910-0374

福井県坂井市丸岡町北横地 40-9

Tel. 0776-50-1105

Fax. 0776-50-1106

この製品は、福井県こども療育センター
と共同で企画・開発しています