

Uクッションは、包み込むような形状で広い面積で身体を支えます。緊張を抑え、全体のリング形状の大きさを調整する事で、重い変形を伴う障害をお持ちのお子さんの日常の姿勢をやさしくサポートします

体位変換と姿勢保持の為のクッション

お母さんの抱っこのようなクッション



ソファーなどにのせるだけで、 手軽に、しっかり座位姿勢を サポートできます。

腹臥位



腹部を圧迫しないので、胃ろう をされている方も安心して使用 していただけます



側臥位

一体型のため、体を動かしても位置が ずれず、安定した臥位姿勢を保てます。

ボタン




ループ(3箇所) ループをボタンに かけて使用します




ループとボタンをかける位置でリングの大きさが 簡単に調整できます。しっかりとめる事ができる ので、安心してお使いいただけます。



広い支持面で包みこむようにサポート するから、ゆったりリラックスできます

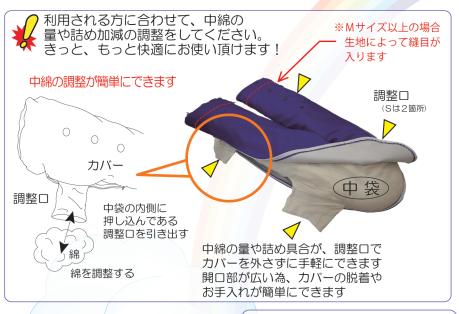

クッション本体 カバー (メッシュ生地・レザー生地) 中身 (ポリエステル綿・綿生地袋)

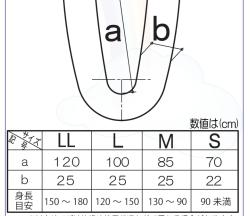

※対応サイズは体格や使用状況などで異なる場合があります。 ※手作り品のため寸法は精密ではありません。 また、綿の詰め具合により寸法が変化します。 ※改善のため仕様等は予告なく変更する場合があります。

記載の製品は、福井県こども療育センター と共同で企画・開発しています

人とじかをつなぐモノづくり ヒューマンサポートプロダクトの Lee製作室です



Lee製作室 (http://lee-lee.jp) facebook で近況を配信しています。 ホームページよりお越しください。 F910-0374

福井県坂井市丸岡町北横地 40-9 TEL: 0776-50-1105 FAX: 0776-50-1106


○U クッションの特性

U クッションは、寝たきり状態で過ごす重度障がい者及び高齢者の方の、様々な臥位(寝た)姿勢をサポートする為に考案された商品です。

Uクッションの最大の特徴は、ループとボタンを留めることで、Uの字のクッションを身体にフィットした輪っか状の一体化したクッションに変え、利用者の身体をトータルサポート出来る点にあります。この特徴によって、利用者の身体全体を持ち上げることなく、仰臥位(仰向け)から側臥位(横向き)そして腹臥位(腹這い)と、様々な姿勢変換が誰でも簡単に行えるようになります。座位保持にも効果的に使用できます。

○U クッションの効用(褥瘡防止効果と呼吸の改善効果)

Uクッションを輪っか状態で使用した場合は、中綿の柔らかな感触と相まって、利用者には抱っこされているような安心感が精神的なリラックス効果を生み、具体的に筋緊張の緩和効果が期待できます。そして、仰臥位の場合、後頭部から肩・体幹・臀部までをトータルでサポート出来るため、後頭部・肩甲骨部・仙骨部への加圧が分散され褥瘡防止効果も大きいと思われます。また、仰臥位の場合、頭部から肩を適切にサポートすることで胸部に余裕が生まれ、呼吸が楽になります。舌根沈下による呼吸困難や唾液の誤嚥が危惧される方が取られる側臥位姿勢にも、背面のクッションの受け方を調整する(背面側の U クッションを毛布やクッションで押さえる)ことで利用者が最も楽な姿勢を簡単に作りだすことが出来るので効果的に使用出来ます。(但し、恒常的に側臥位をとる場合は、下になった肩の除圧には十分配慮が必要です。)

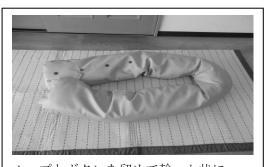

ループとボタンを留めて輪っか状に



肩が圧迫されないように、左右に広げる



腹臥位は、三角マットがあると効果的



お尻の下にあまり隙間が出来ないように



側臥位の角度の調整は、背面の押えで



座位保持用具としても使えます